

使用說明書

MAX-S0832B/R

安壽可收摺凹型洗澡椅(藍·紅)




ブルー

購入対象品
(介護保険)


最大使用者体重
100kg





直接用蓮蓬頭局部清潔。

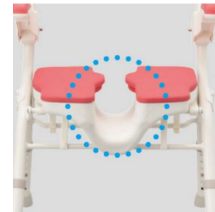

入浴時・身體溫熱促進
排便。U字型設計讓浴
室保持乾淨。

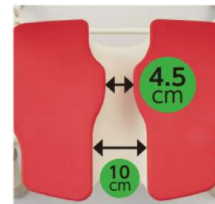

U型溝槽中間空間略窄，
讓身體保持穩定，不會
陷落。

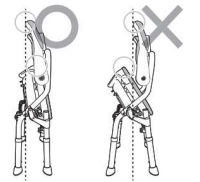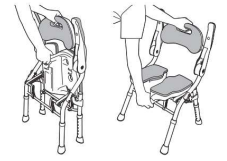

品番	MAX-30832B · MAX-30832R		顏色	藍色 · 紅色	
JAN	4970210858196 · 4970210858189		購買日期	年 月 日	
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ●請一手握住座椅背部，一手握住座面前方內側並往下壓。 ●接著把雙手放在座面前方由上往下壓，讓座椅確實卡進座椅下方的固定鎖。 ●可以根據使用狀況將兩側扶手放下。 ●先將扶手向上收起。 ●請一手握住座椅背部，一手握住座面前方內側並向上收合。 ●收合完成時，椅背上方位置會超過與座位上方位置。 		注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●請在平坦的地面使用洗澡椅。 ●請不要泡在浴缸裡使用。 ●請確認使用的地面與椅子上沒有肥皂水、洗髮精等。 ●請勿任意分解、改裝此產品。 ●僅限洗澡時使用，請勿做其他用途。 ●坐在上面時，請勿移動椅子。 ●請勿將椅背作為扶手使用。 ●請勿將全部重量倚靠在單側扶手上。 ●請勿將手撐在椅子邊緣，容易滑下椅子。 	
站立尺寸	寬460×長450~530×高640~740mm	生產國	中國	保證書	有(購入日起1年內)
折疊尺寸	寬460×長190×高780~890mm	重量	4.1kg		
座面尺寸	寬360×長300mm	最大使用者體重	100kg		
座面高度	300~430mm · 6position				
材質	座面·椅背：聚乙烯 腳套：合成橡膠(防霉加工) 扶手、折疊軸(前·後)、座面固定：聚丙烯 握把：合成橡膠(防霉加工) 椅背軟墊·座面軟墊：EVA樹脂(防霉加工) 椅腳管·短管：鋁 高度調整彈簧：不鏽鋼 金屬零件：不鏽鋼 · 鋁 · 黃銅		進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578	