



手持式 聽大
輔聽器

使用說明書

感謝購買手持式聽六輔聽器。

此產品針對一般聲音聽不清楚的狀況所設計，與醫療器材的助聽器為不同產品。

本書說明防止意外的重要注意事項與產品使用方法。使用前請詳細閱讀此使用說明書。

閱讀完後，請保管於就近可翻閱的地方。

警告圖示

使用說明書會以下列圖示說明。為了安全使用本產品，請充分理解圖示內容，詳閱本說明書。

警告

若不遵守此圖示事項，可能導致火災、觸電等重大傷害或死亡。

注意

若不遵守此圖示事項，可能導致觸電或其他意外，造成人身財物受損。

警告

① 請勿放置於小孩可拿取處。若誤食零件可能導致嚴重的後果。


② 請勿同時使用其他的助聽器與本產品，容易有聲音回授現象(發出嗶 - 的刺耳聲)，對耳朵造成不良影響。

③ 音量調節開關轉至「中」或「大」接近耳朵時，會

發生聲音回授現象，導致耳朵疼痛。使用時，請先將音量調至「小」，等碰到耳朵時，再進行音量調整。

④ 當耳機軟墊接觸到耳朵時，即可開始使用。若耳機軟墊與耳朵中間有空隙時，會發生聲音回授現象(發出嗶 - 聲)，導致耳朵疼痛。請緊貼耳朵使用。

⑤ 請勿用手遮擋住麥克風。若遮住時，會發生聲音回授現象(發出嗶 - 聲)，導致耳朵疼痛。

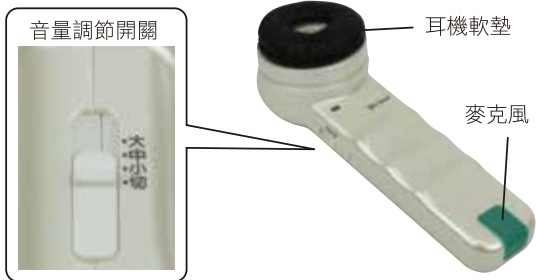

正確使用方法：

緊貼耳朵使用。



錯誤使用方法：

耳機軟墊與耳朵中間有空隙時，
會發生聲音回授現象(發出嗶 - 聲)





警告

- ① 請勿放置於高溫場所。
- ② 若長時間不使用時，請將電池取出。長時間放置於本體內，可能造成電池漏液導致故障。
- ③ 本產品為精密儀器，請勿大力碰撞或摔落。
- ④ 若摔落造成破損，請勿觸碰內部。
- ⑤ 請勿自行分解改造。
- ⑥ 請勿將本體浸泡於水或海水。
- ⑦ 配件的電池為測試用，電池壽命可能較短。

各部位名稱



使用方法

1

請於電池蓋上微凹處，壓住①往②移動(圖1)。電池蓋往③方向打開。(圖2)



圖 1



圖 2

※電池蓋無法直接由圖2直接打開，請依照上述步驟開啟。強行打開的話，可能會造成破損。
請將2顆鹼性電池依正確電池+、-極方向放入(圖3)。


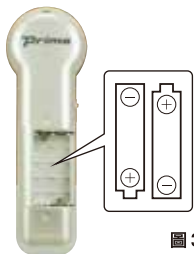


圖 3

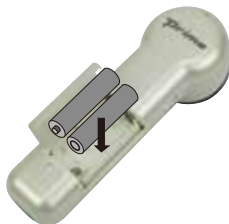

請將電池蓋往④壓下。(圖4)

請將電池蓋往⑤方向壓下直到聽到「喀」的一聲關上。(圖5)



圖 4

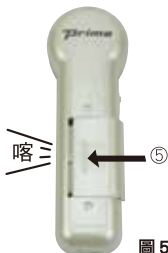


圖 5

2 請將本體側面的音量調節開關由「切」切換至「小」。
此時，燈會亮綠燈。

※若燈沒亮，請更換新的電池。

3 請將軟墊貼著耳朵，立刻可收聽聲音。
此時，或聽不清楚時，請將音量調節開關調至「中」或「大」，
調整至清楚的音量。

警告

請注意，若耳機軟墊與耳朵中間有空隙時，會發生聲音回授現象(發出嗶 - 聲)，導致耳朵疼痛。

4 請將麥克風朝向想聽聲音的方向

警告

請注意，請勿用手遮擋住麥克風。若遮住時，會發生聲音回授現象(發出嗶 - 聲)，導致耳朵疼痛。

5 不使用時，請將音量調節開關調整至「切」。

注意

若長時間不使用時，請將電池取出。長時間放置於本體內，可能造成電池漏液導致故障。

※若電池外有透明的塑膠套，請務必拆去後使用。
※配件的電池為測試用，電池壽命可能較短。

適用外部麥克風(另購)

- 請使用單耳麥克風，也可對應插入式麥克風。
- 使用麥克風插洞插入外部麥克風。
- 若插入外部麥克風，內建麥克風失效。

以上如規格有變更，將不另行通知，敬請見諒。

清潔維護

- ① 請使用柔軟乾布擦拭。
- ② 請勿使用揮發性液體、酒精、去漬油等溶劑清潔。

規 格

重量：約112g(包含電池)

電池壽命：約2個月(每天使用1小時)

使用電池：4號鹼性電池×2顆

配件：4號鹼性電池×2顆，收納袋

規格及外觀可能因產品改良，無事先預告即變更設計。

委製商：プリモ株式会社

委製商：190-1232東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-3-5

進口商  杏豐實業股份有限公司
SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw

進口商: 杏豐實業股份有限公司

地址: 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓

電話: (02)6635-8858

杏豐實業股份有限公司 - 商品保證基準

- ① 本產品的品質保證期是從購買日起1年以內。
- ② 保證期間內故障免費維修,須維修時,請洽所購買的販賣店。
- ③ 保證書遺失不再補發,請妥善保管。
- ④ 故障時,請勿自行拆修或交予非本公司之技術人員檢修,以免造成更嚴重的損壞。
- ⑤ 在下列情況下,保證期內也會收取費用。
 - 不在台灣地區。
 - 保證書上沒有消費者姓名,購買日期,所購買的販賣簽章,或上述內容修改。
 - 使用不當,自行維修或改造,所發生故障或損壞的情況。
 - 天災地變,事故或掉落所產生的故障或損傷。
 - 消耗品的劣化,損傷或污損。
 - 實際維修所發生的必要運費及維修人員交通費。
- ⑥ 本保證書在台灣地區有效,不提供來自海外地區的維修服務。
- ⑦ 保證期間後,如有故障,視檢修情況酌收零件費,必要運費及維修人員交通費。

保證書

請詳細填寫

商品名稱: 手持式聽六輔聽器	姓名:
商品型號: MAX-R0599	電話:
購買日期:	地址:
保證期限: 購買日起 1 年	
經銷商蓋章:	備註:

蒙惠顧,謹致以謝意,為確保您的權益,請務必要求經銷商販賣店填寫購買日期並蓋店章,始能享有本公司完善的保證服務